

Madrassbeskyttelse:

Materiale: Stoffet er belagt med polyuretan. Pustende, vanntett, behagelig, rasler ikke, vask 95°C, kan tørkes av, holdbar. **BRANNSIKKER, BESKYTTET MOT SVAMP, MUGGBESKYTTET.**

Passer også som overtrekk til en hygienemadrass.
Vi produserer alle størrelser.

Modell PS1
Med gummibånd



Modell PS4
Med glidelås



Putebeskyttelse:

Modell TS1
Materiale: se madrassbeskyttelse
Med klaffer



Redningslaken:

Modell EL-2A
Legges under madrassen.
Rask og lett å ta i bruk samt lett å dra i.
De små gummibåndene holder borrelåset på plass.
Materiale: Glatt nylon med PU-belegg. Vask 80 °C,
ikke presstørk.
Størrelse: 195 x 75 cm



Flyttemadrass:

Modell SP1

Brukes f.eks. til å flytte pasienten fra en seng til en annen eller til en dusjbåre.

Lett å bruke siden den er glatt.

Materialet er vanntett så det er lett å tørke av madrassen. Materiale: Glatt nylon med polyuretan belegg + 2 cm skumplast inni.

Vask 80°C, ingen presstørking.

Størrelse: 180 x 60 cm



Bruksanvisning: To personer, en på hver sin side av sengen, den ene snur pasienten til siden og løfter samtidig opp den ene siden av sengebeskyttelsen, lakenet eller tilsvarende. Samtidig skyver den andre personen flyttemadrassen så langt under pasienten som mulig, slik at pasientens hode ligger øverst på flyttemadrassen. Pasienten legges tilbake. Ved å holde i sengebeskyttelsen drar den ene personen pasienten opp på underlaget som er ved siden av sengen. Den andre personen løfter i sengebeskyttelsens andre side og pasienten sklir lett på underlaget. Flyttemadrassen tas bort til slutt.

Forkle:

Modell ES1

Materiale: se madrassbeskyttelse

Man svetter ikke i det, passer veldig bra bl.a. ved stell.



Smekke:

Modell RS1

Materiale: Se madrassbeskyttelse

Størrelse: 45x90 cm

Festes med trykknapper

En plastlist ved posens kant holder posen åpen hele tiden.

Modell RS2

Samme som i RS1, men posen er på midten.



Universalbelte:

Med stopp som kan tørkes
Mykt, behagelig å bruke. Med hurtiglås.
Materiale: Se madrassbeskyttelse + 2 cm skumplast



Separat greindel

Hindrer at pasienten sklir ned fra stolen.
Materiale: Se madrassbeskyttelse + 0,5 cm skumplast

Sengebelte:

Modell LSK1 for hender
Det er mykt og man svetter ikke i det, lett å tørke av.
Materiale: Se madrassbeskyttelse + 0,5 cm skumplast
Bredde 10 cm



Modell LSJ1 for føtter
Bredde 15 cm

Løftelaken for dusjbruk:

Modell NS1
Materiale: Nylon med PU-belegg.
Vask 80°C, ingen presstørking.
Størrelse: 100 x 100 cm



Løfteduk:

Modell NL1

