

SUOMEN LAITOSTEKSTIILIT KY
Laajakaista 3 B, ovi E
96400 ROVANIEMI
FINLAND
Tel: + 358407778000
E-mail: info@suomenlaitostekstiilit.com
www.suomenlaitostekstiilit.com

Asennus- ja käyttöohje
Haaravyö HAR1

20.01.2026

Tuote: Haaravyö HAR1

Basic UDI-DI: 643007748HAR199

UDI-DI: 6430077480032

GMDN code: 13356



Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi tuoliin estääkseen istujan liukumisen pois tuolilta. Kaikenlainen muu käyttö on kielletty. Jos toimitus on vahingoittunut tai puutteellinen, älä ota tuotetta käyttöön. Ota välittömästi yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään. Rikkinäinen ja loppuun käytetty tuote hävitetään: Hävittäminen: viedään jätteenkäsittelylaitokseen: Lajittamaton jäte

Tukeva ja kestävä haaravyö tuo turvaa tuolin käyttäjille. Se toimii turvavyön tavoin ja T-muotoisena estää käyttäjää liukumasta istuimelta. Haaravyössä on pikalukitus, joten sen käyttö on helppoa ja nopeaa. Solumuovi tekee vyöstä pehmeän ja mukavan. Materiaali on vedenpitävää ja todella helppo pyyhkiä ja pestä puhtaaksi. Yksi koko sopii kaikille, pitkät säätövarat.

Asennusohje:

Aseta haaravyö istuimelle, leveämpi pää tulee eteen. Haaravyö HAR1 laitetaan tuolille alempi turvavyönauha kiinnitetään tuoliin kuvan mukaisesti.

(kuva: haaravyö alussa)



Henkilö istuu tuolille ja haaravyön ylempi turvavyönauha kierretään henkilön vatsan kautta tuolin taakse, siten että lukkopiuha kierretään myös pyörätuolin pystyputken ympäri kertaalleen. Siten tuolissa istuja ei saa pyöritettyä lukkoa omalle kohdalleen. Katso: <https://youtube.com/shorts/P6TVN3LpIFc>

YouTuben videossa on hyvin näytetty se, että kun tarvitsee estää vyön pyörittäminen eteen, jolloin istuja pystyy avamaan itse turvavyön. YLEMPI TULEE KIINNITTÄÄ MOLEMPIEN KÄSINOJEN YMPÄRI JA SITTEN TAKAA LUKKO KIINNI.

Jos lukko on sivulla siten että henkilö saa sen itse auki niin pesumerkkiin ei tule mitään tekstiä asiasta. Jos lukko on takana siten että henkilö ei saa sitä itse auki niin pesumerkkiin tulee teksti: Käyttö vain lääkärin valvoessa ja henkilökunnan läsnäollessa.

(kuva: haaravyö kiinnitettynä)



(kuva: haaravyö takaa)



Painorajoitus: 200 kg

Pesulämpötila: 80 C, pestään pesupussissa lukot suljettuna, pehmuste poistettava ennen pesua.

CE- ja MD-merkitty

Uudelleenkäyttö: Ennen uudelleenkäyttöä täytyy silmämääräisesti tarkistaa ettei ompelusaumoissa, materiaalissa ja tikkauslangoissa ole ratkeamia tai reikiä. Jos sellaisia löytyy niin tuote on hävitettävä.

Materiaalit:

ulkopuoli: PU/nylon: täyttää Oekotex100, class II vaatimukset

pehmuste: solumuovi: täyttää REACH ja SVHC vaatimukset

sisäpuoli: enstex: täyttää Oekotex100, class I vaatimukset

Valitusosoite viallisesta tuotteesta: ks. ylläolevat yhteystiedot

Jos tuote rikkoontuu käytön aikana ilmoita siitä valmistajalle (osoite yllä) ja toimivaltaiselle viranomaiselle. Kerro samalla millaisessa tilanteessa tuote rikkoontui.